

# OCULOCIN PROPO 10 ml

**Písemná informace pro uživatele. Sterilní oční kapky 10 ml. Lahvička 10 ml s kapátkem. Zdravotnický prostředek. Úleva a osvěžení pro podrážděné oči.**

## Indikace

Oční kapky pro podrážděné a unavené oči zabezpečující hygienu a hydrataci očí vystavených dennímu působení externích faktorů.

## Složení

Čištěná voda, glycerin, extrakt z aloe vera, extrakt z heřmánku, extrakt z propolisu, chlorid sodný, borová voda, tetraboritan sodný, disodium EDTA.

## Dávkování a způsob podání

Před prvním použitím odstraňte ochranný kroužek z víčka. Po sundání víčka obraťte lahvičku dnem vzhůru, kapátkem dolů a aplikujte 1—2 kapky do každého oka. Je bezpečné používat kapky tak často, jak je zapotřebí. Vhodné pro nositele kontaktních čoček. Nekapejte přímo na kontaktní čočky, s nasazením kontaktních čoček počkejte nejméně 2 minuty po použití kapek.

## Upozornění

Nedotýkejte se kapátka otevřené lahvičky a lahvičku po aplikaci ihned zakryjte víčkem. Předejte tak kontaminaci. Nepolykejte roztok a uchovávejte kapky mimo dosah dětí. Nepoužívejte kapky, pokud jste alergičtí na jakoukoliv složku roztoku. Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Nemrazte. Nepoužívejte kapky, pokud jsou v roztoku viditelné kousky. Nepoužívejte kapky, pokud je lahvička poškozena, nebo roztok z lahvičky vytéká. Nepoužívejte kapky po datu expirace, které je uvedeno na obalu a na lahvičce (EXP). Pokud lahvička není otevřená, odpovídá datum expirace poslednímu dni v měsíci. Po otevření lahvičky je možno kapky užívat 90 dní. V případě podráždění očí konzultujte užívání kapek s lékařem. Používejte kapky dle informací z písemné informace pro uživatele, nebo kapky užívejte dle doporučení lékaře, či lékárníka.

**Výrobce:** UAB ORIGMED, Raguvos st.5, Kaunas, LT-44275 Litva, Tel./Fax +370 37 334655, [www.origmed.com](http://www.origmed.com)

**Distributor:** OPA Group s. r. o., Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6, Česká Republika, Tel.:+420 230 234 180, [www.opagroup.cz](http://www.opagroup.cz).

[www.oculocin.cz](http://www.oculocin.cz)

