

ALLERGY® Nasaleze

Přírodní prevence alergické rýmy

Nasaleze - obrana proti alergii

Co je Nasaleze?

Nasaleze je klinicky ověřený přírodní práškový sprej, který poskytuje rychlou a účinnou ochranu proti senné rýmě a dalším vzdušným alergenům jako jsou pyl, prach a zvířecí alergeny. Nasaleze spolupracuje s vlastním obranným mechanismem vašeho těla. Vytváří na nosní sliznici přírodní bariéru proti vzdušným alergenům a řeší tak samotnou příčinu alergie a ne až její příznaky.

Složení

Obsahuje celulóзовый prášek rostlinného původu a práškový extrakt z máty peprné.

Jak Nasaleze účinkuje?

Jemný celulóзовый prášek ulpívá po aplikaci na nosní sliznici, kde díky vlhkosti sliznice reaguje a vytváří tenkou ochranou gelovou bariéru. Ta sliznici pokryje a funguje jako účinný filtr vzdušných alergenů, které se nemohou dostat na sliznici a spustit tak alergickou reakci. Mechanismus účinku Nasaleze byl zdokumentován ve více než 20 klinických studiích. Pro dosažení co nejlepšího účinku si pozorně přečtěte instrukce pro použití.

Kdo může používat Nasaleze?

Nasaleze je zcela přírodní prostředek vhodný pro dospělé, těhotné, kojící ženy a děti od 18 měsíců. Udržujte mimo dosah malých dětí. Nasaleze neobsahuje žádné léky.

Varování



Nepoužívejte, pokud je porušen pojistný kroužek připevněný na lahvičce. Vždy po použití nasadte zpět uzávěr a uložte na suchém místě. Po otevření spotřebujte do 6 měsíců. Pokud se prášek dostane do oka, oko opláchněte vodou. Nejsou známy žádné vedlejší účinky. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem. Neoplachujte lahvičku vodou nebo jinou kapalinou. Pro více informací navštivte internetové stránky Nasaleze: www.nasaleze.cz, www.nasaleze.com.

Pokud jste nikdy předtím tento produkt nepoužívali, přečtěte pečlivě následující řádky.

Jedná se o nosní, práškový, bariérový sprej, ne o kapalinu. Princip účinku Nasaleze je jednoduchý a aplikaci zvládne každý hned napoprvé. Před prvním použitím je doporučeno vyzkoušet tlak potřebný k získání ideální dávky, což je zhruba několikacentimetrový prachový obláček. Protřepete lahvičku, odstraňte uzávěr, lahvičku namířte směrem od sebe a rychle zmáčkněte. Prachový obláček uvidíte před sebou.

Obecné pokyny pro použití

1. Jemně se vysmrkejte.
2. Před každou aplikací vždy protřepete lahvičku.
3. Sundejte uzávěr.
4. Umístěte trysku lahvičky do jedné nosní dírký a lahvičku zmáčkněte, zatímco se nosem jemně nadechujete.
5. Opakujte krok 4 u druhé nosní dírký.
6. Opakujte po každém vysmrkání.

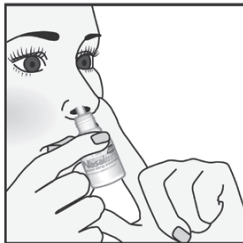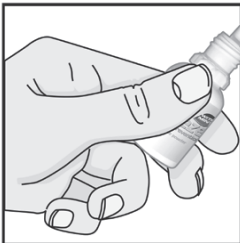

Pokud zjistíte, že je pro vás obtížné lahvičku zmáčknout jednou rukou, proveďte stisk oběma rukama, ale nejdřív vyzkoušejte, zda se velikost prachového obláčku pohybuje v rozmezí cca 10 - 15 cm.

Kdy a jak často Nasaleze aplikovat?

Nasaleze je doporučeno používat v průměru třikrát denně. Tak je zajištěna celistvá gelová bariéra, která je pro účinek klíčová a je třeba ji obnovovat po každém vysmrkání, či silném kýchnutí.

Máte stále potíže?

V případě vysoké koncentrace pylu v ovzduší aplikujte dvojnásobnou dávku a používejte tak často, jak potřebujete. Nasaleze je přírodní produkt a neobsahuje žádné léčiva. Nezapomenejte si Nasaleze vzít s sebou ven do přírody (při alergii na pylu), na návštěvu k sousedům s domácími mazlíčky (při alergii na zvířata), použít před luxováním (alergie na roztocích)

Péče o Nasaleze

Udržujte za všech okolností lahvičku a zvláště trysku suchou. Neoplachujte lahvičku vodou či jinou tekutinou, protože to může mít vliv na správnou funkci práškového spreje. Nevystavujte přímému slunečnímu záření a teplotám nad 30 °C.

Minimální trvanlivost a číslo šarže: uvedeno na obalu

Nasa ALL CZ 03/17



Pro více informací o přípravku Nasaleze Allergy, navštivte www.nasaleze.cz, www.nasaleze.com.
Výrobce: Nasaleze Unit 3 Woodside house Ballafletcher Business Park, Douglas Isle of Man IM4 4QE UK
Atlantic Bridge Ltd, 19 Willowside, Woodley, Berkshire, RG5 4HJ UK
Distributor pro ČR: Ascomed s. r. o., Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6, www.ascomed.cz, www.opagroup.cz.

