



SMART PEAK FLOW BLUETOOTH ADAPTOR

Rychlý průvodce nastavením

SMART PEAK FLOW Bluetooth Adaptor je elektronické zařízení určené pro umožnění spojení mezi SMART PEAK FLOW výdecheměrem a jakýmkoliv chytrým telefonem umožňujícím Bluetooth připojení. Zařízení je nejlépe používat s chytrým telefonem bez 3,5mm zvukového konektoru. V případě, že telefon zvukový konektor obsahuje, Bluetooth adaptor není třeba.

Jak nastavit zařízení

Nejdříve si podrobně pročtete manuál k výdecheměru SMART PEAK FLOW a stáhněte z App Store (Apple) a Play Store (Android) aplikaci SMART PEAK FLOW (Smart Asthma).

Tento Bluetooth adaptor se připojuje přes 3,5mm zvukový konektor k vašemu SMART PEAK FLOW výdecheměru a pomocí Bluetooth spojení k vašemu telefonu (tak se eliminuje nutnost fyzického kontaktu mezi adaptorem a telefonem).

- 1.Zmáčkněte tlačítko na adaptoru a držte po dobu 3 sekund (kruh okolo knoflíku bude blikat červeně a modře)
- 2.Najděte na svém telefonu Bluetooth nastavení.
- 3.V Bluetooth nastavení zadejte pokyn „Spárujte s novým zařízením“ a počkejte, až se objeví na seznamu SMART PEAK FLOW a poté na něj klikněte. Můžete být vyzváni, abyste potvrdili spárování s Bluetooth adaptorem. V tomto případě klikněte na “Spárovat”. Pokud spárování proběhlo úspěšně, kruh kolem tlačítka na adaptoru bude svítit modře. Spárování s telefonem je nutno provést pouze jednou, Váš telefon si bude adaptor pamatovat.
- 4.Nyní připojte váš SMART PEAK FLOW výdecheměr do konektoru adaptoru a můžete začít měřit.

Jak používat váš SMART PEAK FLOW výdecheměr s Bluetooth adaptorem

- 1.Stáhněte si do telefonu SMART PEAK FLOW aplikaci, nastudujte manuál k SMART PEAK FLOW výdecheměru.
- 2.Pokud se Váš aplikace zeptá na výběr zařízení, vyberte „Bluetooth zařízení“.
- 3.Nyní již můžete používat Váš SMART PEAK FLOW stejně, jako kdyby byl přímo napojen na telefon

Funkce Bluetooth adaptoru

Zapnutí/vypnutí

- 1.Pro zapnutí držte zmáčknuté tlačítko na přední straně adaptoru po dobu 3 sekund (během této doby uvidíte 3 záblesky modrého světla). Až zařízení přejde do párovacího módu, uvidíte záblesky červeného a modrého světla. Pokud již byl adaptor s telefonem spárován dříve, spojí se s telefonem automaticky (pokud má telefon zapnuté Bluetooth) a uvidíte svítící modré světlo.
- 2.Chcete-li adaptor vypnout, zmáčkněte tlačítko a držte ho po dobu 3 sekund. Během nich uvidíte 3 záblesky červeného světla.
- 3.Přestanete-li zařízení používat, do 2 minut se samo vypne. Doporučujeme zařízení vypínat, jakmile skončíte s měřením. Šetříte tak baterii.

Nabíjení

Spojte nabíjecí kabel Micro-USB s portem Adaptoru a USB nabíjecího kabelu s jakýmkoliv počítačem nebo zásuvkou (přes adaptor zásuvky). Nabíjení baterie z 0 na 100% trvá přibližně 30 minut. Po plném nabití může být adaptor používán zhruba 4 hodiny.