

Rychlý návod k použití



Výrobce: Bedfont® Scientific Ltd.
 Station Road, Harrietsham, Maidstone,
 Kent, ME17 1JA England
 Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
 E-mail: ask@bedfont.com
 www.bedfont.com
 Issue 1 - May 2019, Part No: LAB760_MGC
 Bedfont® Scientific Limited reserves the right to change or
 update this literature without prior notice.
 Registered in: England and Wales. Registered No: 1289798

1. Stiskněte a držte tlačítko on/off, dojde k zapnutí přístroje. Poté počkejte 60 sekund dokud se monitor nestabilizuje.
2. Nasadte na jednotku nový náústek a vyberte buď dospělého 🧑 nebo dítě 🧒 a proveďte dechový test.
Poznámka: pro ukončení dechových testů zmáčkněte ikonku domečku. 🏠
3. Podle výzvy na obrazovce 🧑 nebo 🧒 se nadechněte mimo přístroj, poté vydechněte do náústku. Nikdy se nenadechněte z náústku.
4. Po objevení ikonky výdechu, 🧑 nebo 🧒, držte monitor zpříma a jemně vydechněte do náústku. Ujistěte se, že nemáte zakryty výdechové otvory.
Poznámka: Výdech trvá přibližně 12 sekund u dospělých a 10 sekund u dětí.
5. Obrazová animace vás povede během výdechu, pokračujte ve výdechu dokud se neobjeví zelená fajfka ✓, která znamená úspěšně provedený test.

Poznámka: Pokud nebudete vydechovat podle doporučeného postupu, test zapípá, což značí jeho selhání a na obrazovce se objeví červený křížek ✗. Zvolte 🔄 k opakování testu nebo 🏠 k zobrazení výsledku.
6. Po zobrazení zelené fajfky se na obrazovce objeví výsledek v jednotkách ppb.
7. Výsledek můžete uložit zmáčknutím ikony diskety 💾, nebo se můžete vrátit na úvodní stránku zmáčknutím ikonky domečku. 🏠
8. Pokud se rozhodnete výsledek uložit, objeví se Vám profil pacientů. Pokud se jedná o pacienta, který měl již dříve založený profil, přidejte pouze výsledek nebo zadejte nového pacienta. Zadejte nového pacienta pomocí jména, nebo rodného čísla a zmáčkněte ikonu diskety. 💾
9. Odstraňte náústek a zlikvidujte ho v součinnosti s lokálními nařízeními o likvidaci odpadů.
10. Pokud nebudete již dále měřit, zmáčkněte a držte tlačítko on/off, dokud nedojde k vypnutí FeNObreath a poté FeNObreath uložte do stojánku s nabíječkou.

Poznámka: PIN je požadováno pro uložení výsledků, výchozí PIN je 0000. Je doporučeno změnit si výchozí PIN na kombinaci 4 číslic, která si budete pamatovat. Pokud jste nezadávali PIN během posledních 30 minut, budete požádáni o zadání PIN před přístupem k patientským výsledkům. Pokud zadáte PIN špatně, budete upozorněni a obrazovka Vám umožní nové zadání. Pokud PIN zapomenete, kontaktujte MGC Diagnostics nebo firmu ASCO-MED, spol. s r. o.

Změna informací vyhrazena.
 Verze: 1_11_2019

Aktuální verzi najdete na webových stránkách: www.asco-med.cz/ke-stazeni