

beurer

FWM 50



CS Vyhřívaná bota s masáží
Návod k použití

CE

Obsah

1. O shiatsu masáži	3	5.3 Zapnutí/vypnutí funkce zahřívání (☺☺)	5
2. Obsah balení	3	5.4 Funkce automatického vypnutí	5
2.1. Popis zařízení	3	6. Čištění a údržba	5
3. Důležité pokyny	3	7. Uložení	6
4. Použití v souladu s určením	4	8. Likvidace	6
5. Obsluha	5	9. Co dělat v případě problémů?	6
5.1. Uvedení do provozu	5	10. Technické údaje	6
5.2 Zapnutí/vypnutí funkce shiatsu masáže	5	11. Záruka/servis	6

Vysvětlení symbolů

	Čtěte pokyny!		Neprat
			Nebělit
	Nevpichujte žádné špendlíky!		Nesušit v sušičce prádla
			Nežehlit
	Používejte pouze v suchých místnostech.		Nečistit chemicky
IPX1	Ochrana proti kapající vodě		Nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky).
	Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.		
	VAROVÁNÍ; varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.		
	POZOR; bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství.		

1. O shiatsu masáži

Shiatsu je forma tělesné masáže vyvinutá přibližně před 100 lety v Japonsku, která vychází z představ tradiční čínské masáže. Základem je systém energetických drah (meridiánů) v lidském těle.

Cílem shiatsu masáže je povzbudit psychickou, emocionální a duševní pohodu ošetřované osoby. Proto se musí odblokovat energetické dráhy a stimulovat samoregulační síly těla.

Toho shiatsu terapeut dosáhne tím, že plynulými pohyby zvyšuje tlak podél energetických drah (meridiánů). Ačkoli shiatsu znamená v doslovném překladu „tlak prstů“, používají se při masáži kromě prstů i dlaně, lokty a kolena. Terapeut při masáži používá celou svou tělesnou hmotnost, aby vyvinul potřebný tlak.

Masáží určitého bodu na chodidle lze ovlivnit příslušné orgány v těle. Přesto však doporučujeme, abyste se před bodovou masáží reflexních zón informovali prostřednictvím literatury nebo konzultací u lékaře a dosáhli poté požadovaného efektu.

2. Obsah balení

1 ohřívadlo nohou s shiatsu masáží a vložkou

1 síťový adaptér

1 návod k použití

2.1. Popis zařízení

1. Síťový adaptér

2. Kabel


3. Připojovací zdířka

4. Tlačítko funkce masáže

5. Tlačítko funkce zahřívání

6. Ohřívadlo nohou s shiatsu masáží

7. Vložka

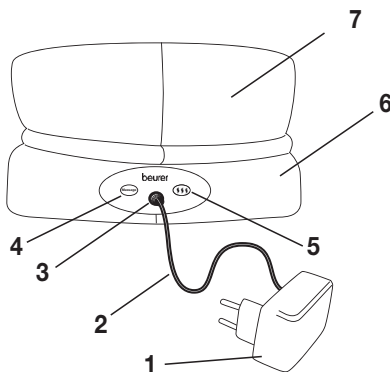

3. Důležité pokyny

Uschovejte pro pozdější použití



VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen na ochranu vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, nýbrž i na ochranu produktu. Dodržujte proto bezpečnostní pokyny a předejte tento návod v případě předání výrobku dále.
- Tento ohřívač nohou nesmí používat osoby necitlivé na teplo a jiné osoby vyžadující ochranu, které neumějí reagovat na přehřátí (např. diabetici, osoby s kožními změnami zapříčiněnými nemocí nebo zjizvenými plochami v oblasti aplikace, po požití léků tišících bolest nebo alkoholu).
- Toto ohřívadlo nohou nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.

- Toto ohřívadlo nohou nesmí používat malé děti (3–8 let), ledaže by vypínač byl nastaven rodiči nebo jinou dohlízející osobou a dítě bylo poučeno, jak má s ohřívadlem nohou bezpečně zacházet.
- Toto ohřívadlo nohou mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání ohřívadla nohou a pokud chápou případná rizika.
- Děti si s ohřívadlem nohou nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Toto ohřívadlo nohou není určeno pro použití v nemocnicích.
- Toto ohřívadlo nohou se nesmí používat k zahřívání zvířat.
- Nepoužívejte toto ohřívadlo nohou s obutými botami.
- Do ohřívadla nevpichujte žádné špendlíky.
- Používejte pouze v suchých místnostech. 
- Používejte pouze přiložený originální síťový adaptér (viz kapitola „Technické údaje“).
- Elektrická a magnetická pole vycházející z tohoto ohřívadla nohou mohou za určitých okolností rušit funkci vašeho kardiostimulátoru. Nedosahují však zdaleka hraničních hodnot: síla elektrického pole: max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT.
Před použitím tohoto ohřívadla nohou se proto poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.
- Za kabely netahejte, nekrutě s nimi nebo je nelámejte.
- Toto ohřívadlo nohou je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení.
Pokud se takové známky objeví, ohřívadlo nohou nebylo správně používáno a již se neohřívá, je třeba ho před dalším použitím nechat zkontrolovat výrobcem.
- Pokud je síťový kabel tohoto ohřívadla nohou poškozen, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.
- Bezpodmínečně dodržujte pokyny týkající se obsluhy (kapitola 5), čištění a údržby (kapitola 6) a uložení přístroje (kapitola 7).
- Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

4. Použití v souladu s určením

Tento produkt je určen k zahřívání a masáži lidských nohou.



VAROVÁNÍ

Nepoužívejte toto ohřívadlo nohou s obutými botami, protože se tím snižuje citlivost na teplo a ohřívadlo nohou se může znečistit. Toto ohřívadlo nohou není určeno pro použití v nemocnicích nebo v komerční oblasti. Nesmí se používat pro zahřívání kojenců, malých dětí, osob s neschopností vnímat teplo nebo bezmocných osob a zvířat. Jinak hrozí nebezpečí poranění.

5. Obsluha

5.1. Uvedení do provozu

- Připojte kabel síťového adaptéru k vypínači ohřívadla nohou.
- Síťový adaptér zapojte do zásuvky.

5.2 Zapnutí/vypnutí funkce shiatsu masáže

- Funkce shiatsu masáže se zapíná stisknutím tlačítka funkce masáže na zadní straně ohřívadla nohou. Masážní hlavice se začne otáčet.
- Funkce shiatsu masáže se vypíná opětovným stisknutím tlačítka funkce masáže na zadní straně ohřívadla nohou. Masážní hlavice se zastaví.



POZOR

Pokud budete na masážní hlavice příliš tlačít, funkce masáže se z bezpečnostních důvodů zastaví. Abyste opět mohli obnovit funkci ohřívadla nohou, povytáhněte kabel z přípojovací zdířky a opět ho zasuňte.

5.3 Zapnutí/vypnutí funkce zahřívání (🔥🔥🔥)

- Funkce zahřívání se zapíná stisknutím tlačítka funkce zahřívání (🔥🔥🔥) na zadní straně ohřívadla nohou. Nad tlačítkem funkce zahřívání se rozsvítí červená kontrolka LED.
- Funkce zahřívání se vypíná opětovným stisknutím tlačítka funkce zahřívání na zadní straně ohřívadla nohou. Červená kontrolka LED nad tlačítkem funkce zahřívání zhasne.

5.4 Funkce automatického vypnutí

Ohřívadlo nohou se asi po 30 minutách provozu z bezpečnostních důvodů automaticky vypne. Pokud chcete opět ohřívadlo nohou použít, stiskněte znovu tlačítko funkce masáže nebo zahřívání.

Vypněte ohřívadlo nohou a vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud již nebudete ohřívadlo nohou po automatickém odpojení používat.

6. Čištění a údržba



POZOR

Před čištěním vždy nejdříve vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
Jinak hrozí nebezpečí poškození přístroje.

Drobné znečištění ohřívadla nohou můžete odstranit navlhčenou utěrkou nebo případně jemným tekutým pracím prostředkem.



POZOR

- Respektujte, že se ohřívadlo nohou nesmí chemicky čistit, ždímat, sušit v sušičce, mandlovat ani žehlit. Jinak by se mohlo ohřívadlo nohou poškodit.

Vyjímatelná vložka se může prát v pračce při teplotě 30 °C.

Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.



POZOR

- Ohřívadlo nohou použijte opět tehdy, jestliže budou ohřívadlo nohou i vložka zcela suché. Jinak hrozí nebezpečí poškození přístroje.

7. Uložení

Pokud nebudete ohřívadlo nohou delší dobu používat, doporučujeme uskladnit ho v originálním obalu.



POZOR

Ohřívadlo nohou nechejte nejdříve zchladnout. Jinak by se mohlo ohřívadlo nohou poškodit. Během skladování na ohřívadlo nohou nepokládejte žádné předměty, abyste ho nepoškodili.

8. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



9. Co dělat v případě problémů?

Problém	Příčina	Odstranění
Ohřívadlo nohou se nezahřívá nebo nelze aktivovat masážní funkci, zatímco - síťový adaptér je propojen s funkční zásuvkou. - kabel síťového adaptéru je propojen s přípojovací zdírkou ohřívadla nohou. - obě funkce (zahřívání + masáž) jsou zapnuty.	Ohřívadlo nohou je vadné.	Zašlete ohřívadlo nohou na adresu servisního střediska.

10. Technické údaje

Technické údaje k vyhřívání botě: viz typový štítek na vyhřívání botě.

Technické údaje k síťovému adaptéru: viz typový štítek na síťovém adaptéru.

Schválené síťové adaptéry:

Síťová zástrčka EU: S024FV1200200

Síťová zástrčka EU: RSS1006-240120-W2E-H

Síťová zástrčka UK: RSS1006-240120-W3U-H

11. Záruka/servis

Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady se obraťte na místního prodejce nebo místní pobočku (viz seznam „Service international“).

Při zaslání přístroje přiložte kopii dokladu o koupi a stručný popis závady.

Platí tyto záruční podmínky:

1. Záruční doba produktů BEURER činí 3 roky nebo – pokud je delší – rozhodující je záruční doba od data nákupu platná v příslušné zemi.

Při uplatňování nároku z odpovědnosti za vady je nutné doložit datum nákupu dokladem o koupi nebo fakturou.

2. Opravou (celého přístroje nebo jeho částí) se záruční lhůta neprodlužuje.
3. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku
 - a. neodborné manipulace, např. při nedodržení uživatelských pokynů.
 - b. oprav nebo změn ze strany zákazníka nebo neoprávněných osob.
 - c. přepravy od výrobce k zákazníkovi nebo během přepravy do servisního střediska.
 - d. Záruka se nevztahuje na příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení (manžeta, baterie atd.).
4. Odpovědnost za následné přímé nebo nepřímé škody způsobené přístrojem je vyloučena v případě, že byly při poškození uznány nároky z odpovědnosti za vady.

